

La importancia del ajuste

Las mascarillas desechables 3M™ solo son eficaces cuando existe un buen sellado entre sus bordes y la cara del usuario. En el momento en el que se rompe este sellado, la protección se ve en peligro, puesto que el aire contaminado puede introducirse por los huecos existentes.

Deberán seguirse estas instrucciones de ajuste cada vez que se utilice una mascarilla para partículas 3M™ Aura™ serie 1800+.




Asegúrese de tener la cara bien afeitada. La mascarilla no debe utilizarse si se tiene barba, incluso incipiente, u otro tipo de vello debajo de la zona del sellado facial, ya que esto podría impedir que quedara bien sellada a la cara.

Use su mascarilla correctamente:

El clip nasal se debe amoldar a la nariz y a las mejillas para proporcionar un buen sellado. No apriete el clip nasal con una sola mano, ya que podría no quedar bien ajustado.

Asegúrese de que los paneles estén totalmente desplegados.

La mascarilla debe colocarse correctamente sobre la cara y la cabeza.

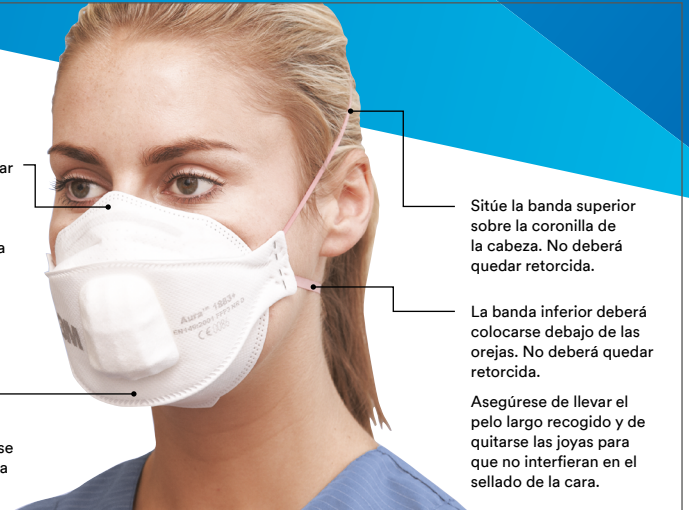

Sitúe la banda superior sobre la coronilla de la cabeza. No deberá quedar retorcida.

La banda inferior deberá colocarse debajo de las orejas. No deberá quedar retorcida.

Asegúrese de llevar el pelo largo recogido y de quitarse las joyas para que no interfieran en el sellado de la cara.

1 y 2



- 1 Con el reverso hacia arriba y utilizando la lengüeta, separe los paneles superior e inferior de la mascarilla para formar una copa. Doble ligeramente en el centro del clip nasal.
- 2 Asegúrese de que ambos paneles estén completamente desplegados.

4



- 4 Colóquese la banda superior en la coronilla de la cabeza y la inferior por debajo de las orejas. Las bandas no deberán quedar retorcidas. Ajuste los paneles superior e inferior para un ajuste cómodo, asegurándose de que los paneles y la lengüeta no estén doblados.

3a



- 3a Sostenga la mascarilla con una mano con el lado abierto hacia la cara.

3b



- 3b Sujete las dos bandas con la otra mano. Sujete la mascarilla por debajo de la barbilla, con el puente nasal hacia arriba y tire de las bandas por encima de la cabeza.

5



- 5 Moldee con ambas manos el clip nasal a la forma de la nariz para garantizar un ajuste preciso y un sellado correcto.
- ⚠ Es posible que la mascarilla no se ajuste bien si aprieta el clip nasal con una mano. Use las dos manos.

6



- 6 Realice una verificación de ajuste cubriendo el frente de la mascarilla con ambas manos teniendo cuidado de no alterar su ajuste.

Si está usando una mascarilla **sin válvula**, exhale con fuerza. Si está usando una mascarilla **con válvula**, inhale con fuerza.

Si hay fugas de aire alrededor de la nariz, reajuste el clip nasal para eliminar la fuga y luego repita la verificación del ajuste. Si hay fugas de aire en los bordes de la mascarilla, vuelva a colocar y reajustar las bandas de la cabeza para eliminarlas y luego repita la comprobación del ajuste.

Si no consigue ajustar la máscara correctamente, no acceda a zonas peligrosas. Hable con su supervisor.

www.3M.com.es/salud-epi